



## **NOWOŚĆ** **MediQuick®**

**Gotowy do użycia alkoholowy  
preparat do szybkiej dezynfekcji  
powierzchni nieinwazyjnych  
wyrobów medycznych.**

- szerokie spektrum biobójcze
- krótki czas działania – już w 30 sek.
- delikatny zapach
- nie pozostawia smug

**Preparat do użytku profesjonalnego.  
Wyrób medyczny Kl. II a, CE 0044**


Treści prezentowane  
w niniejszym materiale  
przeznaczone są wyłącznie  
dla użytkowników profesjonalnych.



**medilab.pl**

# NOWOŚĆ MediQuick®

Gotowy do użycia alkoholowy preparat  
do szybkiej dezynfekcji powierzchni  
nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

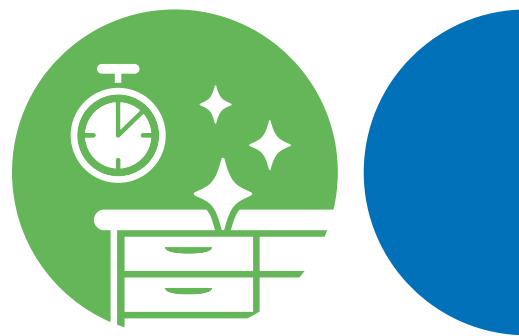

## PODSTAWOWE CECHY

- produkt gotowy do użycia
- kompozycja na bazie mieszaniny alkoholi
- szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy i wirusobójczy
- bardzo krótki czas działania – już w 30 sek.
- wykazuje szeroką kompatybilność materiałową
- dodatkowo przebadany zgodnie z normą EN 16615
- idealny do dezynfekcji wszelkich powierzchni medycznych typu łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny oraz inne trudno dostępne powierzchnie różnego rodzaju sprzętu medycznego
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi (szkło, aluminium, stal nierdzewna, metal, ceramika)
- wyjątkowo delikatny i nieszkodliwy dla skóry – przebadany dermatologicznie
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie, jak i przy użyciu ściereczki
- preparat łatwo się rozprowadza
- po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych smug
- charakteryzuje się przyjemnym, delikatnym zapachem

## INSTRUKCJA UŻYCIA

- Preparat do użytku profesjonalnego. Gotowy do użycia – nie rozcieńczać!
- Preparat nanosić na powierzchnie czyste przy użyciu ściereczki, bądź bezpośrednio na powierzchnię poprzez spryskiwanie (jeśli jest taka potrzeba).
- Upewnić się, że powierzchnia jest dokładnie zwilżona.
- Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na min. 30 sek., w zależności od wymaganego spektrum biobójczego i zalecanego czasu ekspozycji.
- Przed zastosowaniem środka prosimy o zapoznanie się z etykietą i ulotką informacyjną produktu.

## SKŁAD CHEMICZNY

**100 g płynu zawiera:**  
25,9 g etanol, 11,8 g propan-2-ol,  
0,2 g alkylobiguanide

## SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

**Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:**

bakteriobójcze – 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: M.terrae – 5 min.;  
drożdżakobójcze – 1 min.;  
aktywność wobec wirusów:  
VACCINIA, HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro – 5 min.

## OPAKOWANIA

MediQuick: butelka – 1 L  
MediQuick: kanister – 5 L

## Wyposażenie dodatkowe:

- końcówka spryskująca
- jednorazowe chusteczki włókninowe

## DYSTRYBUTOR W POLSCE:

**MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.**  
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska  
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2303-04

## WYTWÓRCA:

**NW-Chemie GmbH**  
Langbaurchstr. 15  
D-53842 Troisdorf, Niemcy  
rheosol.com