



AKATEX Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 34
43-300 Bielsko -Biała

NIP: 547-218-77-06 **REGON:** 368794561 **KRS** 0000703570
Rachunek: ING Bank Śląski 69 1050 1070 1000 0090 3138 1362

PRZEPIS KONSERWACJI I ODZIEŻY LETNIEJ I ZIMOWEJ Z ELEMENTAMI ODBŁASKOWYMI

Prać ręcznie w roztworze środków piorąco – dezynfekujących, zgodnie z zarządzeniem podanym w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Nr 11 z 25.20.1996 r., poz. 32, punkt 4.2 (tabela) str. 185.

- temperatura kąpieli piorąco– dezynfekującej do 40⁰ C.*
- płukać kilkakrotnie w ciepłej wodzie (min. 2 razy), a następnie w zimnej, nie wykręcać i nie wycisnąć.*
- suszyć po dokładnym wyprostowaniu zagnieceń, rozwieszając w temperaturze pokojowej.*
- prasować w temperaturze do 110⁰ C – omijając taśmy i emblematy odbłaskowe*

UWAGA!

- Nie należy stosować środków piorąco-dezynfekujących zawierających chlor*
- nie czyścić elementów odbłaskowych żadnym środkiem chemicznym*
- W przypadku zabrudzenia ubrania krwią lub innymi wydzielinami ludzkimi, należy je niezwłocznie spłukać zimną wodą, nie dopuszczać do utrwalenia (wyschnięcia) i silnego zabrudzenia*
- ze względu na możliwość zabrudzenia krwią i innymi wydzielinami ludzkimi, ubranie należy prać i dezynfekować jedynie w specjalistycznych punktach pralniczych*

Kontakt

Telefony

Centrala/Fax: 33 49 92 999
Dział Handlowy: 33 49 92 980

E-mail Centrala:

akatex@akatex.pl

E-mail Dział Handlowy:

zamowienia@akatex.pl

WARUNKI PRANIA I DEZYNFEKCJI

*Pranie należy prowadzić w medium wodnym w temperaturze do 40⁰ C.
Proces prania z jednoczesną dezynfekcją powinien trwać max. 20 minut.
Moduł kąpieli 1:5.*

Warunki prania i dezynfekcji zalecane przez „Akatex” producenta specjalistycznej odzieży ochronnej, m.in. dla Służby Zdrowia, zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia, zawartym w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

CELUJ W JAKOŚĆ

INSTRUKCJA UŻYWANIA I KONSERWACJI

ODZIEŻ OPERACYJNA WIELOKROTNEGO UŻYTKU:
MEDITEX (SUKIENKA, ZESTAW BLUZA + SPODNIE, ZESTAW BLUZA + SPODNICA), PRODUKOWANA W ROZMIARACH S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Przeczytaj instrukcję ze zrozumieniem



Przed rozpoczęciem korzystania z produktu konieczne jest przeczytanie i zrozumienie instrukcji. Jeżeli zawartość instrukcji nie jest zrozumiała, należy skontaktować się z producentem.

Definicje użyte w instrukcji

Produkt Odzież operacyjna wielokrotnego użytku.
Producent Firma Garmex A.Jafiszow, W.Kamiński sp.j. z siedzibą w 16-001 Kleosin, Ignatki 40B.

Opis produktu i jego przeznaczenie

Produkt jest wyrobem przeznaczonym do użytku przez personel szpitalny. Głównym miejscem zastosowania produktu jest Blok Operacyjny. Produkt w znacznym stopniu wpływa na ochronę pacjenta przed drobnoustrojami podczas zabiegów chirurgicznych. Produkt jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13795.

Produkt dostępny jest w rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL oraz innych nietypowych.

Produkt jest wyrobem wielokrotnego użytku, który może być użyty do 200 razy z zachowaniem swoich właściwości pod warunkiem stosowania niniejszej instrukcji przez użytkownika oraz bezwzględnego wdrożenia technologii prania przez pralnie obsługującą.

Produkt jest wyrobem niejąłowym.

Deklaracja zgodności



Deklaracja zgodności umieszczona jest na osobnym formularzu dołączonym do opakowania zbiorczego bądź do pojedynczej sztuki produktu.

Pranie i Dezynfekcja



UWAGA: Poniżej podane informacje na temat sposobu prania oraz te umieszczone na metce odzieżowej są informacjami ogólnymi. W celu dokładnego ustalenia technologii prania należy skonsultować się ze swym dostawcą środków piorących oraz producentem produktu.

Operacja	Czas	Temperatura
Plukanie wstępne w przypadku mocnych zabrudzeń	5 min.	Zimna woda
Pranie wstępne	5 - 10 min.	35 - 50°C
Pranie zasadnicze z dezynfekcją chemiczno-termiczną, pH max 10,5	15 - 20 min.	60 - 70°C
Schładzanie		40°C
Plukanie	5 min.	Ciepła woda
Plukanie	5 min.	Zimna woda
Plukanie końcowe neutralizacja pH 5,5 - 6,5	5 min.	Zimna woda
Wirowanie	4 min.	400 obr/min.
Suszenie	15-20 min.	Max. 80°C

Maksymalny wsad do pralnicy / suszarki to 70%

W końcowym etapie prania, powinno odbyć się zakwaszenie do poziomu pH 5,5 – 6,5.



Maksymalna temperatura prania 70°C.



Dozwolone bielenie tylko środkiem tlenowym/bezchlorowym.



Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze, temp. wyjściowa max. 80°C.



Prasowanie w maksymalnej temperaturze 150°C.



Nie czyścić chemicznie.

Sterylizacja

W przypadku stosowania sterylizacji produktu, powinna odbywać się ona w autoklawach parowych w temperaturze 134°C przez 5-7 min., bądź 121°C przez 15 min.

Nie sterylizować produktu w jednym wsadzie razem z metalowymi kontenerami.

Pierwsze użycie

Produkt w końcowej fazie produkcji jest wstępnie czyszczony, jednak przed pierwszym użyciem musi być bezwzględnie wyprany.

Zalecenia

Należy regularnie kontrolować powierzchnię w przestrzeniach ładunkowych pralek / suszarek, celem sprawdzenia, czy nie ma tam miejsc szorstkich mogących uszkodzić tkaninę.

Produkt może być prany w tradycyjnych pralniach szpitalnych oraz w pralniach przemysłowych.

W przypadku konieczności usuwania plam należy stosować wybielacze nie zawierające chloru.

Niejonowy środek piorący powinien mieć temperaturę mętnienia powyżej 70°C.

Należy stosować wyłącznie środki piorące posiadające wpis do rejestru Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

W celu zachowania właściwości produktu nie należy prać go z bielizną bawełnianą.

Plukanie powinno spowodować usunięcie środków piorących. Pozostałości środków piorących niekorzystnie wpływają na właściwości tkanin zastosowanych w produkcie.

pH kąpieli piorącej maksymalnie 10,5.

Czynności niedozwolone

Nie zaleca się stosowania środków zmiękczających.

Nie wolno przeładowywać pralki / suszarki. W przeciwnym razie tekstylia mogą ulegać zagnieceniom.

Nie wolno maglować produktu.

Nie wolno stosować środków piorących zawierających chlor.

Nie wolno używać produktu w pobliżu źródła otwartego ognia.

Warunki Gwarancji

W okresie gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany produktu, wynikającej z wad materiałowych lub konstrukcyjnych.

W celu zachowania gwarancji należy bezwzględnie stosować się do niniejszej instrukcji, jak i wszelkich zaleceń udzielanych przez producenta.

W przypadku wystąpienia roszczeń gwarancyjnych, użytkownik musi w jednoznaczny sposób udokumentować krotność użycia produktu.



GARMEX A.Jafiszow, W.Kamiński sp.j.
Ignatki 40B, 16-001 Kleosin, Polska
Tel.: +48 85 663 03 14, biuro@garmex.pl